

Mode d'emploi pour la reconstitution avec BAXJECT II

Blanc = Poudre

Transparent = Eau



Préparation du kit d'injection

- Amener les flacons à température ambiante.
- Se laver les mains.
- Retirer les capsules des bouchons des flacons.
- Désinfecter chacun des deux bouchons avec un tampon d'alcool différent et laisser sécher.

BAXJECT II - Dispositif de transfert sans aiguille



Démarrer par cette étape

A

Ouvrir l'emballage de BAXJECT II sans toucher l'intérieur.
Ne pas retirer BAXJECT II de son emballage.

B

Flacon de poudre Flacon d'eau ppi

Retourner l'emballage contenant BAXJECT II vers le bas.
Introduire la pointe TRANSPARENTTE de BAXJECT II dans le centre du flacon d'eau ppi, en appuyant vers le bas.

C

Saisir l'emballage par les rebords et le retirer de BAXJECT II, sans toucher la pointe exposée.
Ne pas retirer le capuchon bleu de BAXJECT II et ne pas toucher la pointe exposée.

D1

Retourner le flacon d'eau ppi connecté à BAXJECT II afin de le placer au-dessus du flacon de poudre.
Introduire la pointe BLANCHE de BAXJECT II dans le centre du bouchon du flacon de poudre en appuyant vers le bas.

D2

Le vide va aspirer l'eau dans le flacon de poudre (il est acceptable qu'une petite quantité d'eau ne s'écoule pas dans le flacon de poudre).
Dans le cas où l'eau ne s'écoulerait pas dans le flacon de poudre, se référer au mode d'emploi de BAXJECT II.

E

Agiter doucement jusqu'à dissolution complète de la poudre.
Ne pas secouer.

F

Retirer le capuchon bleu de BAXJECT II.
Retirer le capuchon de la seringue, s'il y en a un, et connecter la seringue à BAXJECT II.
NE PAS INJECTER D'AIR.

G

Retourner le système de façon à placer le flacon contenant la solution reconstituée au-dessus.
Aspirer la solution de concentré dans la seringue en tirant DOUCEMENT sur le piston.
Déconnecter la seringue.

Si vous devez reconstituer plusieurs flacons, vous pouvez utiliser une seringue de volume plus important :

- BAXJECT II étant un dispositif à usage unique, utiliser un BAXJECT II différent pour chaque flacon à reconstituer.
- Recommencer à l'étape G pour chaque flacon de solution reconstituée en utilisant une seringue disposant d'un volume adapté.

Pour les instructions complètes concernant les erreurs de manipulation, se référer au mode d'emploi de BAXJECT II.

Baxter