


Mix2Vial®

Dispositif de transfert
pour reconstitution

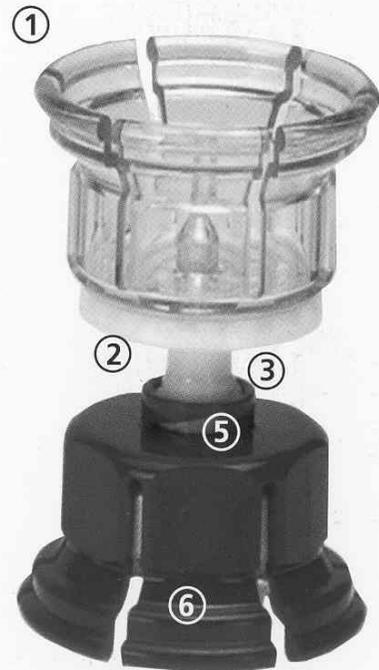

Mode d'emploi

> Respecter les conditions d'asepsie



a. Retirer l'opercule du dispositif Mix2Vial. Sans extraire le dispositif de son emballage, enclencher l'extrémité bleue de Mix2Vial sur le bouchon du flacon de solvant.



b. Retirer l'emballage en le tenant par sa collerette.



d. Séparer les flacons en dévissant le dispositif Mix2Vial.



e. Remplir d'air une seringue stérile, vide. Tout en maintenant le flacon de produit reconstitué verticalement, visser la seringue sur le dispositif Mix2Vial, et injecter l'air dans le flacon.



c. Retourner l'ensemble flacon de solvant-dispositif et l'enclencher sur le flacon de poudre (celui-ci doit être posé sur un plan dur horizontal). Le solvant est transféré automatiquement dans le flacon de poudre. L'ensemble ainsi maintenu, agiter doucement, d'un mouvement circulaire, pour dissoudre totalement le produit.



f. Prélever ensuite le contenu du flacon en tirant doucement sur le piston.