

Le Standard de la Norme P650 (UN3373) doit être garanti pendant le transport de l'échantillon  
Mise à jour 04.05.2018

I. Matériel minimal requis pour la préparation et l'envoi d'un frottis naso-pharyngé (avec référence de commande):

Collection d'échantillon

- a. 1 x tube COPAN avec 3ml de milieu de culture universel avec
  - b. 1 x écouvillon
- [http://copanitalia.com/K37\\_UJM\\_broch.pdf](http://copanitalia.com/K37_UJM_broch.pdf)  
référence de commande : 305 C



Description complète:  
<http://copanitalia.com/index-5.htm>

Emballage envoi

- c. 1 x Flacon de transport pour tube COPAN avec matière absorbante
  - d. 1 x Bouchon pour flacon de transport
- <http://www.sarstedt.com/katalog/en/index.html#/138/>  
référence de commande : 78898 (tube); 65679 (bouchon)
- e. 1 x Enveloppe étanche en polyéthylène contenant un papier buvard absorbant (jusqu'à 25ml de liquide)
- [http://www.milian.com/Milian\\_Suisse/fr/Catalogue/Emballage/Emballages\\_de\\_transport/Sachets](http://www.milian.com/Milian_Suisse/fr/Catalogue/Emballage/Emballages_de_transport/Sachets)  
référence de commande : SE 25
- f. 1 x Etiquette UN 3373 (taille min. 5cmx5cm; norme P650 pour catégorie B, substance biologique)
- <http://www.airconsult-bf.com/2013/etiquettes.html>, Tél.: 022 741 20 27, peut aussi être imprimé par soi-même


II. Préparation de l'envoi:

1. **Téléphoner au CRIVE au 079 769 64 40** puis remplir la feuille de demande d'analyse CRIVE du laboratoire de Virologie ([http://virologie.hug-ge.ch/centres\\_reference/crive\\_demande\\_analyses.html](http://virologie.hug-ge.ch/centres_reference/crive_demande_analyses.html)) (disponible en français et allemand)
2. Une fois le prélèvement effectué, mettre l'écouvillon dans le tube COPAN contenant le milieu de transport viral.
3. Glisser le tube COPAN dans le flacon de transport muni d'un matériau absorbant et fermer.
4. Sur l'enveloppe, coller l'étiquette UN 3373 et écrire à côté « Substances biologiques catégorie B ». Noter l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Glisser dans l'enveloppe le prélèvement du patient ainsi que la feuille de demande d'analyses.
5. Fermer l'enveloppe et l'envoyer au laboratoire par courrier A lettre (ne pas utiliser le timbrage paquet courrier normal).


1.



2.

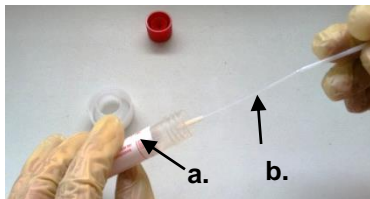

3.

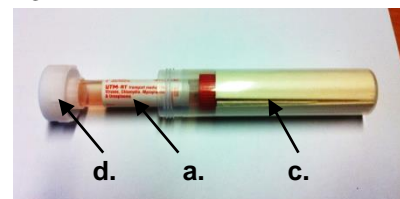

4.



5.



Adresse CRIVE:

Laboratoire de Virologie  
A l'intention du CRIVE  
Service de médecine de laboratoire  
Département de médecine génétique et de laboratoire  
Hôpitaux Universitaires de Genève  
4, Rue Gabrielle-Perret-Gentil  
1211 Genève 14

Téléphone CRIVE:

**079 769 64 40**