

Frottis nasopharyngé pour recherche de virus respiratoires

Matériel et mode d'emploi

- **Tube de transport viral**, écouvillon inclus



<http://copanitalia.com/index-5.htm>


Référence de commande HUG : 305C ou 430614

Réalisation des frottis : (vidéo de démonstration : <http://copanitalia.com/index-5.htm>)

Introduire l'écouvillon par la bouche jusqu'au pharynx et frotter la muqueuse (voir dessin ci-dessous, frottis pharyngé). Puis introduire l'écouvillon (ou un 2^{ème} écouvillon si disponible) dans le conduit nasal jusqu'à atteindre le nasopharynx (environ 7 cm de l'arcade chez l'adulte), faire 2 rotations. Introduire directement le(s) écouvillons dans le tube, le(s) casser à ras le bord.

S'il n'est pas possible de faire les 2 frottis, faire en priorité le nasopharyngé.

COLLER L'ETIQUETTE CORRESPONDANTE DU PATIENT, puis, stocker le prélèvement à 4C° jusqu'à son acheminement par express au Laboratoire de Virologie

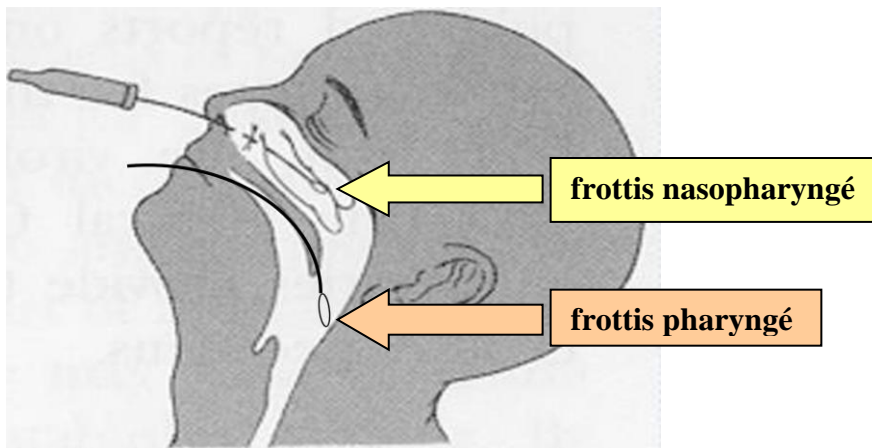

NB : stérilité stricte non-requise lors du prélèvement car recherche de virus