

 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 1 sur 4
	Approbateur : Kévin HADDAD	Version n°1
Pansement Israélien – Bandage d'urgence en Pédiatrie		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 04/03/2026

1. Définition

Le bandage compressif hémostatique est conçu pour arrêter rapidement les saignements sévères grâce à un applicateur de compression intégré.

2. Indications

Le pansement israélien (ou pansement compressif d'urgence) est indiqué pour le traitement immédiat des hémorragies massives, en lien avec un traumatisme grave ou une plaie pénétrante. Il permet de stopper rapidement les saignements importants en appliquant une pression directe et constante via un applicateur intégré, agissant comme un pansement stérile, un dispositif de compression et un garrot si nécessaire.

3. Contre-indications

Il ne doit pas être posé en cas de fractures aiguës du membre, d'infections cutanées locales (gangrène), ou de corps étranger dans la plaie

4. Matériels

- 1 paire de gants non stériles
- Surblouse ou tablier
- Lunettes de protection
- Pansement Israélien

5. Déroulement du soin

○ **Étape 1 : Préparation**

- Calmez et allongez la personne blessée, surélevez le membre atteint, réalisez un point de compression en amont de la plaie.
- Expliquez-lui la procédure.
- Ouvrez l'emballage sous vide (s'il y a du vide, le produit est stérile et intact). Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 2 sur 4
	Approbateur : Kévin HADDAD	Version n°1
Pansement Israélien – Bandage d'urgence en Pédiatrie		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 04/03/2026

○ **Étape 2 : Application de la compresse**

- Sortez le bandage de l'emballage et placez la compresse blanche directement sur la plaie, en veillant à ce qu'elle la recouvre entièrement.
- Pas de désinfection nécessaire avant d'apposer le bandage compressif



○ **Étape 3 : Utilisation de l'applicateur de pression**

- Utilisez la barrette en plastique pour serrer le bandage et appliquer une pression adéquate sur la plaie.
- La barrette de pression doit être placée directement sur la plaie, et non sur un os.



○ **Étape 4 : Enroulement et fixation**

- Continuez à enrouler fermement le bandage autour du membre ou de la zone blessée, en vous assurant que chaque tour est uniforme et maintient une pression continue.
- Fixez l'extrémité du bandage à l'aide de l'agrafe de fermeture fournie.



 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 3 sur 4
	Approbateur : Kévin HADDAD	Version n°1
Pansement Israélien – Bandage d'urgence en Pédiatrie		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 04/03/2026

6. Surveillance

Une surveillance attentive est essentielle pour s'assurer que le bandage est efficace sans compromettre la circulation sanguine.

- **Vérification de la circulation :**

Le bandage doit être fermé, mais pas excessivement serré au point d'entraver la circulation.

- **Signes de bandage trop serré :**

- Peau blanche ou cyanosée (bleutée).
- Augmentation de la douleur, engourdissement ou paresthésies.
- Une sensation de battement dans le membre.
- Une diminution de la température aux extrémités.

- **Vérification de l'efficacité :**

- Assurez-vous que la plaie est bien couverte et que la pression appliquée est suffisante pour contrôler le saignement.
- Si le pansement est complètement imbibé de sang, ne pas le défaire mais en faire un second par-dessus le premier.

7. Durée d'application et retrait

Ce bandage est un dispositif de **premiers secours d'urgence** pour les saignements sévères.

- Il contribue au contrôle de l'hémorragie jusqu'à la prise en charge par les secours ou une équipe chirurgicale.
- Il n'y a pas de "temps de pause" fixe recommandé pour ce type de bandage d'urgence, car il doit rester en place jusqu'à ce que le personnel médical qualifié prenne le relais, évalue la blessure et le retire ou le remplace si nécessaire.

 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 4 sur 4
	Approbateur : Kévin HADDAD	Version n°1
Pansement Israélien – Bandage d’urgence en Pédiatrie		
DFEA, Service d’Accueil et d’Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 04/03/2026

8. Références

- **First Care Products.** (s. d.). *The Emergency Bandage: Instructions for Use.* [Site officiel du fabricant originel.](#)
- [Securimed.](#) (s. d.). *Fiche technique : Pansement israélien compressif d'urgence.* Securimed.fr.
- **Artemis / Brady.** (s. d.). *FT100ITA - Fiche technique pansement compressif israélien.* [Catalogue technique](#)

9. Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ASU-L7AwV_8

10. Personnes rédactrices

JORDAN Isabelle, infirmière spécialisée, service d’accueil et urgences pédiatriques
HADDAD Kevin, responsable d’équipe de soin, service d’accueil et urgences pédiatriques
LACROIX-DUCARDONNOY Laurence, Médecin adjointe agrégée, Cheffe de service d’accueil et urgences pédiatriques

11. Personnes relectrices et validatrices