

 Hôpitaux Universitaires Genève	STERILISATION CENTRALE Direction des Opérations	LF005.4 Diffusion : 08.04.2013
DESINFECTANT DECONEX 53 PLUS		
Rédigé : A.Brunetti/08.04.2013	Vérifié : C. Brehier/ 08.04.2013	Approuvé : H. Ney/ 08.04.2013

Le Deconex 53 PLUS est :

- un désinfectant/nettoyant
- compatible avec tous les matériaux connus d'utilisation hospitalière

1. Dilutions

Faire une dilution à 2% (1 litre de dilution = 20 ml Deconex + 980 ml d'eau)

à 4% (1 litre de dilution = 40 ml Deconex + 960 ml d'eau)

à 0,5% (1 litre de dilution = 5 ml Deconex + 995 ml d'eau)

2. Temps de trempage

Dans une dilution à 2% **15 minutes**

Dans une dilution à 4% **15 minutes**

Dans une dilution à 0,5% **60 minutes**

3. Validité du produit dilué

Le produit est efficace pendant **7 jours, à 2% et 4%**.

Le produit est efficace pendant **2 jours, à 0,5%**.

Eliminer le produit aux dates selon dilution même s'il n'a pas été utilisé pendant ce temps.

Changer la dilution s'il y a des salissures visibles.

4. Références

Site intranet : http://vigigerme.hug-ge.ch/_library/pdf/Desinfectants_HUG_dec2012.pdf