

 Hôpitaux Universitaires Genève	STERILISATION CENTRALE Direction des Opérations	LF006.4 Diffusion : 08.04.2013
DETERGENT CLEANER N		
Rédigé : H.NEY / 08.04.2013	Vérifié : C. Brehier/ 08.04.2013	Approuvé : H. Ney/08.04.2013

Le Cleaner N est un détergent à employer dans la phase de nettoyage

1. Dilution

Faire une dilution à 1% (1 litre de dilution = 10 ml Cleaner + 990 ml d'eau)

2. Temps de trempage

Nettoyage manuel **15 minutes**

Aux Ultrasons **5 minutes**

3. Validité du produit dilué

Le produit dilué est efficace pendant **24 heures**.

Eliminer le produit **tous les jours** même s'il n'a pas été utilisé pendant ce temps.

Jeter la dilution s'il y a des salissures visibles.

Attention : Le Cleaner est uniquement un détergent. (*Aucune action de désinfection*)