

 HUG Hôpitaux Universitaires de Genève	STERILISATION CENTRALE DO	LT010.3 Diffusion : 13.02.2012
DESINFECTION MANUELLE (PROC. CHIMIQUE)		
Rédigé : H.NEY / 13.02.2012	Vérifié : C Brehier/13.02.2012	Approuvé : H. Ney/13.02.2012

1. A effectuer

- En cas d'absence de laveur-désinfecteur pour les dispositifs médicaux ;
- Pour les dispositifs thermolabiles ne supportant pas des températures supérieures à 60 °C ;
- Pour les dispositifs creux dont la machine à laver ne possède pas les buses adéquates.

2. Les produits

- Désinfectants correspondants au but fixé (bactéricide, virucide, fongicide) - Deconex 53 plus selon procédure.

3. Porter des gants et lunettes

- Lors de la préparation des produits de désinfection ;
- Lors de la manipulation du matériel à désinfecter.

Utiliser aussi un masque et un tablier imperméable s'il y a risque de projections

4. Préparer la dilution

Selon le protocole :

1. Respecter les dosages ;
2. Diluer le produit à l'eau froide pour éviter les émanations nocives ;
3. Marquer la date de péremption ;
4. Éviter les mélanges entre différents produits, ainsi que de mélanger les dilutions différentes du même produit ;
5. Respecter les précautions d'emploi du produit.

5. Mettre à tremper

- Les dispositifs après avoir effectué les phases préalables de pré-désinfection, nettoyage et rinçages :
 - Complètement immergés ;
 - Ouverts et/ou démontés ;
 - Les objets creux remplis complètement et agités évitant ainsi les bulles d'air à l'intérieur.
 - Respecter le temps de trempage (temps différents selon le produit et la dilution employés) :

Temps trop court: l'objectif de " désinfection " n'est pas atteint

Temps trop long: apparition d'altérations sur les dispositifs médicaux

6. Changer le liquide de désinfection

- Selon le protocole correspondant au produit utilisé (date de péremption) ;
- S'il est trouble ou a des souillures visibles ;
- Toujours aux dates de péremption même s'il n'a pas été utilisé.

7. Lors du changement de la dilution

1. Rincer le bac à l'eau de robinet ;
2. Nettoyer le bac avec un chiffon imbibé du produit nettoyant/désinfectant et laisser sécher ;
3. Essuyer avec un chiffon imbibé d'un produit alcoolisé (Des-Sur) et laisser sécher ;
4. Refaire la nouvelle dilution.